
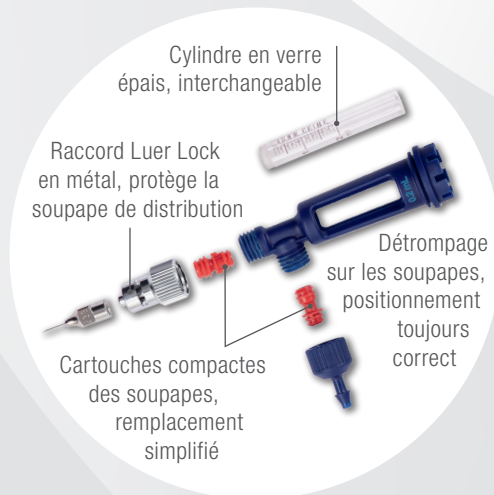


Socorex® *ultra* 1810

Injections de micro à volumes moyens | Hautes performances | Excellente durabilité

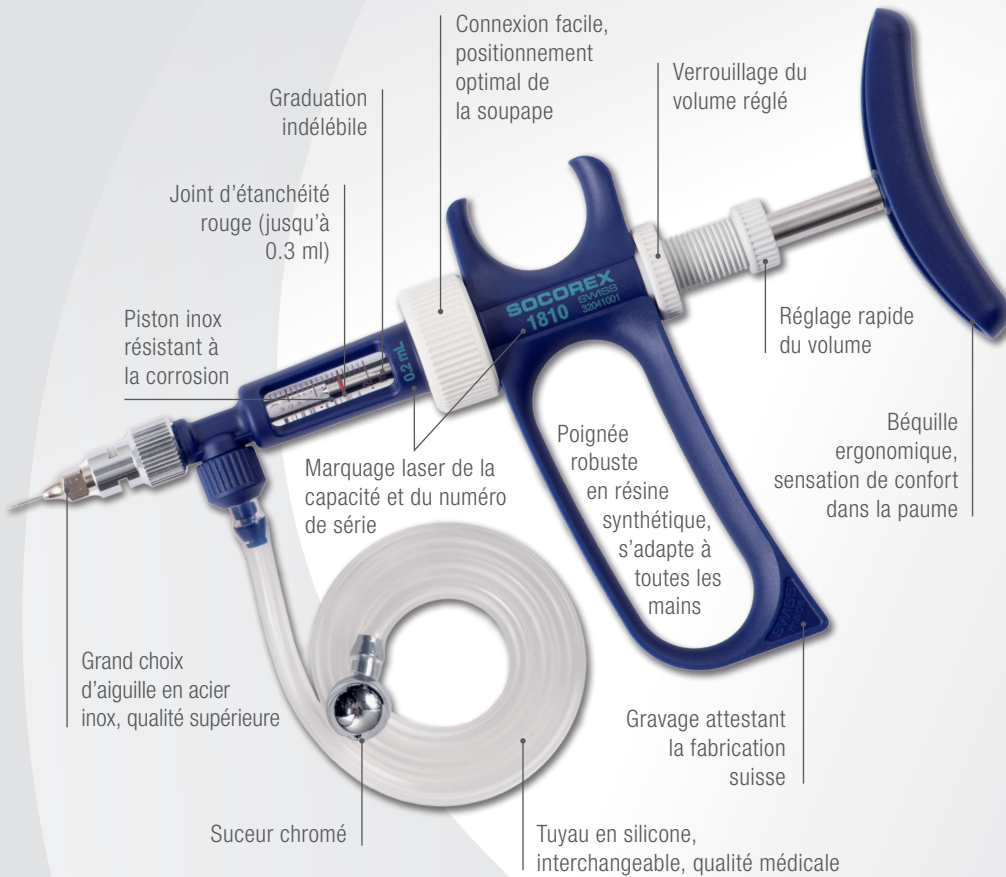

Légèreté et activation très douce

Les seringues pour injection animale Socorex® *ultra* 1810 ouvrent de nouvelles perspectives avec des dosages extrêmement précis dans une plage de 0,02 à 2 ml.

Réutilisables, robustes tout en restant légers, les instruments offrent une ergonomie et une souplesse d'activation inégalées, réduisant considérablement la fatigue de la main.

Caractéristiques et avantages

- Qualité supérieure, durabilité
- Légèreté et souplesse d'activation
- Hautes performances métrologiques
- Convient à tous les types de vaccins et médicaments
- Démontage et entretien faciles
- Autoclavable entièrement assemblé

Matériaux de qualité supérieure

Des matériaux soigneusement sélectionnés offrent une résistance et une durabilité inégalée.



Voir les détails

Choisir adéquatement son modèle

Trouver la combinaison idéale entre volume et course du piston, pour obtenir le meilleur confort et la performance optimale.

Capacité seringue ml	Course du piston et performance de la seringue (CV%)								
	Vol. min.			Vol. inter.			Vol. max.		
	Volume ml	Course mm	CV%	Volume ml	Course mm	CV%	Volume ml	Course mm	CV%
0.1	0.02	4.0	<1.8%	0.05	9.5	<1.2%	0.1	19.5	<0.5%
0.2	0.05	6.0	<1.6%	0.1	11.5	<1.0%	0.2	23.0	<0.5%
0.3	0.05	3.5	<1.4%	0.15	10.5	<0.9%	0.3	21	<0.45%
0.5	0.1	4.5	<1.2%	0.25	11.5	<0.8%	0.5	22.5	<0.4%
1.0	0.1	2.0	<0.7%	0.5	9.5	<0.6%	1.0	19	<0.4%
2.0	0.3	3.0	<0.6%	1.0	10.5	<0.5%	2.0	21	<0.4%


Les performances varient selon le type de liquide, sa viscosité et la taille de l'aiguille.

Informations de commande – Instruments et pièces de rechange essentielles

Seringue prête à l'emploi. Livrée avec tuyau d'aspiration 1m, suceur, canules d'aspiration et d'aération, sachet avec cartouches de rechange, joint de cylindre, joint de piston et guide (jusqu'à 0.3 ml), mode d'emploi.

Seringues ultra 1810				Pièces de rechange essentielles, No. Cat.			
Capacité ml	Volume ml	Division ml	No. Cat.	Cylindre en verre 6 / pk	Sachet de pièces de rechange	Tuyau d'aspiration 1m	O-ring 10 / pk
0.1	0.02 – 0.1	0.005	1810.2.05001	01810.001	1.1810.72001	1810.705	1810.951
0.2	0.05 – 0.2	0.01	1810.2.05002	01810.002	1.1810.72002	1810.705	1810.952
0.3	0.05 – 0.3	0.025	1810.2.05003	01810.003	1.1810.72003	1810.705	1810.953
0.5	0.1 – 0.5	0.05	1810.2.05005	01810.005	1.1810.72005	187.705	-
1.0	0.1 – 1	0.05	1810.2.0501	01810.01	1.1810.7201	187.705	-
2.0	0.3 – 2	0.1	1810.2.0502	01810.02	1.1810.7202	187.705	-

Exemples d'utilisation

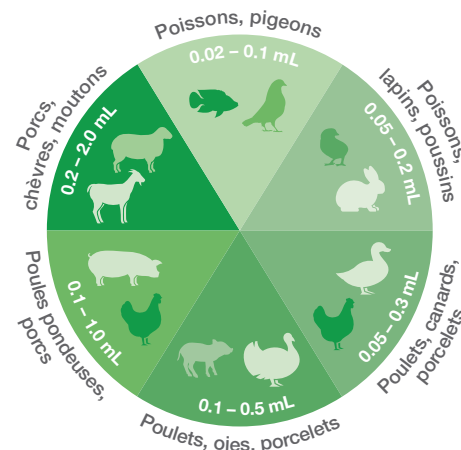

Démontage et entretien

Seringues composées de peu de pièces, faciles à démonter / remonter. Nettoyage efficace, entretien simple. Stérilisation entièrement assemblée avec de l'eau bouillante ou en autoclave à 121°C / 250°F.



Commande – Accessoires

Abacus™ compteur de doses


Comptage précis de chaque injection. Facile à installer et à retirer, aucun outil requis.



Description	No. Cat.
Compteur, 0.1 / 0.2 ml, 1 / pk	1.1810.962
Compteur, 0.3 – 2.0 ml, 1 / pk	1.1810.966
Aimant pour réinitialisation, 1 / pk	1.1810.446

FishGuide™

Positionnement idéal de l'aiguille (seringues jusqu'à 0.5 ml) lors de la vaccination de poissons. Réduit les risques de blessures.

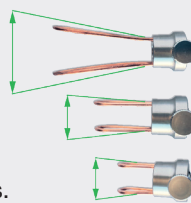

Taille	Emballage	No. Cat.
15 mm long	1 / pk	1.1810.015
25 mm long	1 / pk	1.1810.025
45 mm long	1 / pk	1.1810.045

Aiguilles réutilisables

Qualité supérieure, Luer Lock, acier inox. Durabilité exceptionnelle, autoclavables.



Scanner pour les détails sur les aiguilles