


SOCOREX® SELBSTFÜLLER-SPRITZE ULTRA 1810


Flaschenhalter – Kurzanleitung

Spritzenkörper positionieren

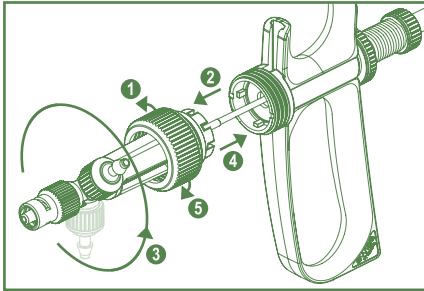


Einlassventil in vertikale Position bringen.

Montage

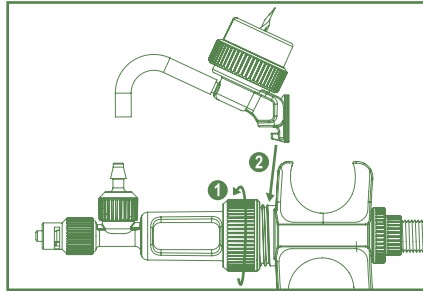


Gehäusemutter abschrauben. Befestigung des Flaschenhalters bis zum Anschlag einführen.

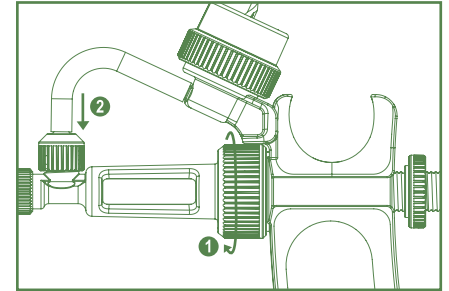


Gehäusemutter anziehen um Flaschenhalter zu fixieren. Schlauch an Einlassventil anschliessen.


Befestigung der Flasche

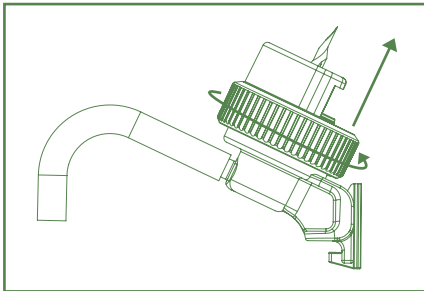

Flaschenverschluss entfernen.

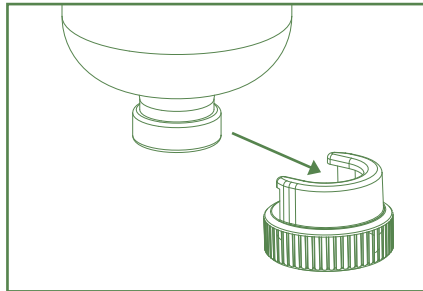


Flasche in Verschluss einsetzen.

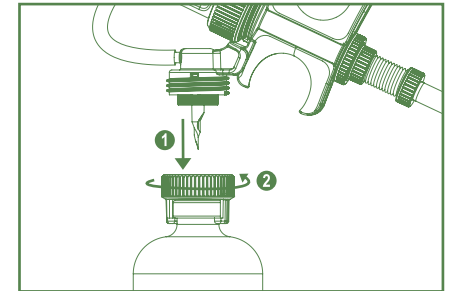

Spritze auf den Kopf drehen, mit Nadel Flaschenpfropfen durchstechen. Verschluss zuschrauben um Flasche zu verschliessen.


! Nicht zu fest anziehen (Gefahr Ventilkartusche zu beschädigen).

Vorbereitung

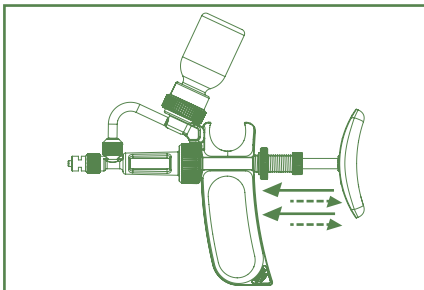


Spritze umdrehen, durch Betätigung des Kolbens Flüssigkeit ansaugen.

Flasche entfernen

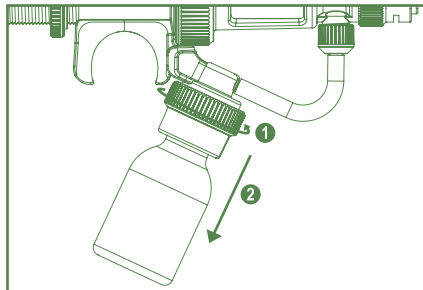


Spritze auf den Kopf drehen. Verschluss abschrauben um Flasche zu entfernen.

Entleerung und Spülung

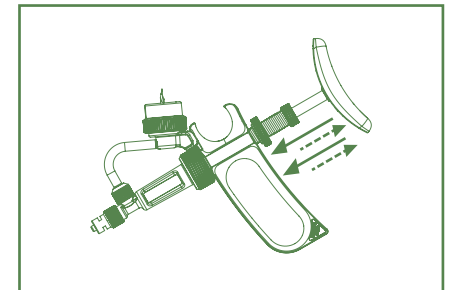


Kolben betätigen um Flüssigkeit auszustossen.

Demontage und Reinigung

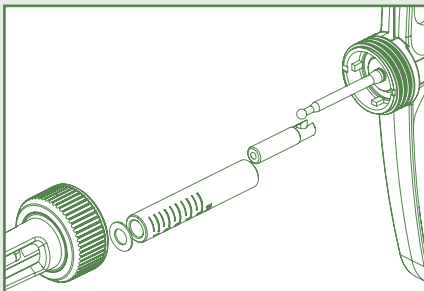

Demontieren und Reinigen gemäss Bedienungsanleitung.

Im Falle beschädigter Nadel

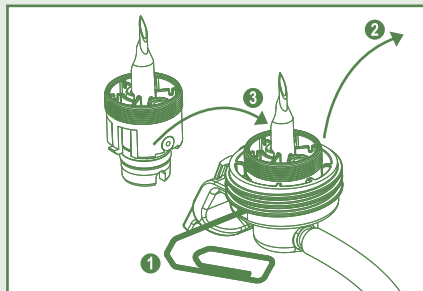

Klammer gedrückt halten und Nadeleinheit herausziehen. Neue Nadeleinheit einsetzen.

! Scharfe Nadel = Verletzungsgefahr
Nicht mehrmals in gleiche Flasche stechen.

Bestellinformationen

Beschreibung	Verp.	Kat. Nr.
Flaschenhalter-Set	1 / pk	1.1810.010
Ersatz Schlauchanschluss, 55 mm	1 / pk	1810.716
Nadeleinheit	1 / pk	1810.386
Flaschenverschluss	1 / pk	1810.374



I.1810VIAL.D - A0523