


SERINGUE AUTOMATIQUE SOCOREX® ULTRA 1810


Guide Rapide

Réglage du corps

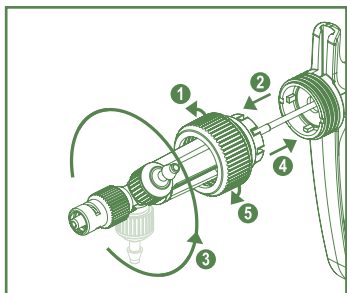


Régler la position du corps.

Amorçage

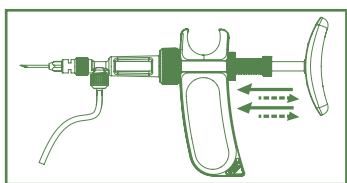


Activer le piston pour aspirer et éjecter le liquide.

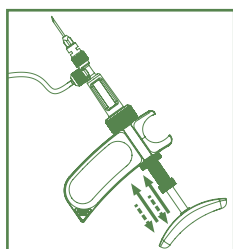


Supprimer les bulles d'air.


Mise en place du tuyau

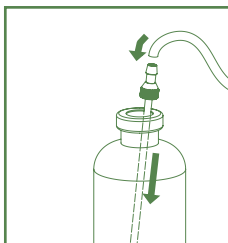

Placer la canule d'aspiration. Raccorder le tuyau.

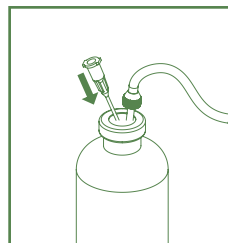


Placer la canule d'aération.

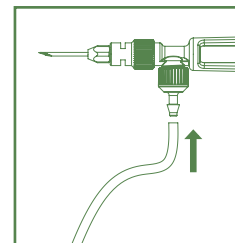


Raccorder le tuyau à la seringue.


Réglage du volume

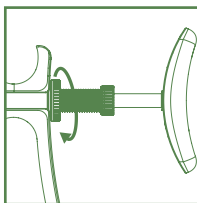

Déverrouiller.

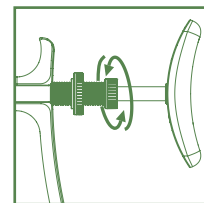


Tourner la douille pour ajuster le piston.

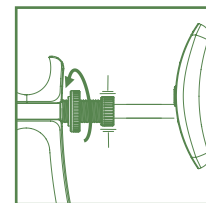


Tenir la douille et verrouiller.

En cas de soupape bloquée


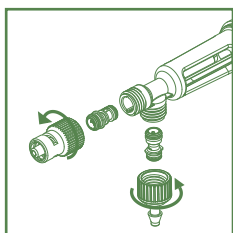


Dévisser et nettoyer les soupapes. Ne rien introduire à l'intérieur des cartouches.

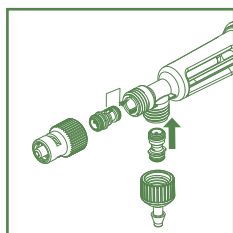


Remonter les pièces en respectant le détrompage.

Lecture du volume

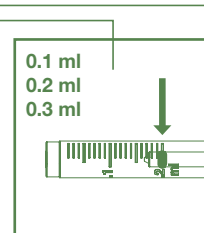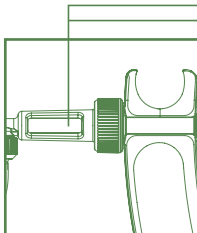


Joint centré sur la graduation.

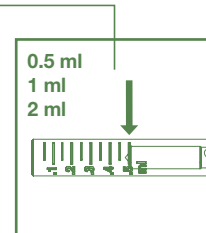


Tranche du piston sur la graduation.

Purger et rincer

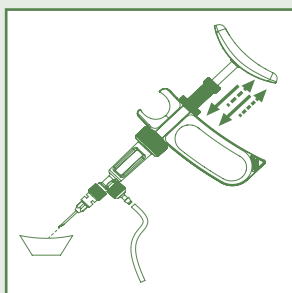


Récupérer le vaccin. Rincer à l'eau ou détergent.


Démonter et nettoyer

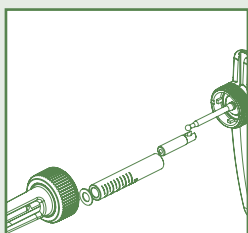


Dévisser l'écrou et séparer les pièces. Les nettoyer et les sécher.

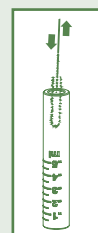

Changer le joint du piston

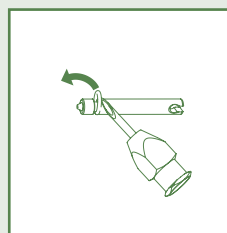


Enlever délicatement.

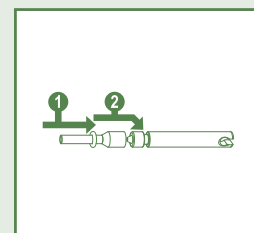


Utiliser le guide pour enfiler un nouveau joint lubrifié jusque dans sa rainure.


Remontage

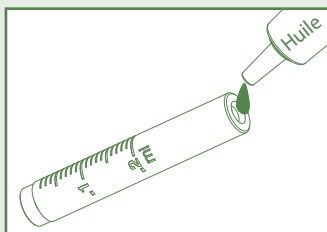

Lubrifier l'entrée du cylindre.

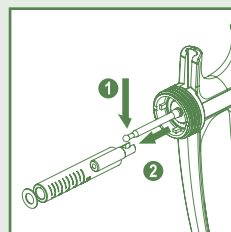

Placer le piston dans le cylindre. Fixer la tige.

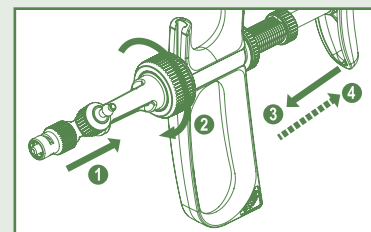

Visser le corps, béquille poussée.



I.GUIDE.1810.F - D0223